

REF : 5889BAC NF1
GM-PM

LINGETTES DESINFECTANTES BACTERICIDE

1. Destination

Hygiène hospitalière - cabinet médical - cabinet vétérinaire - industrie pharmaceutique - collectivités - cantine - restauration - cuisine - industrie agroalimentaire - laboratoires de grandes surfaces - salle de découpe - salle de traite - abattoirs - étable - porcherie - laiterie - Tous les domaines où la désinfection est nécessaire et contrôlée.

2. Propriétés

Les lingettes 5889BAC NF/1 bactéricide nettoie, désinfectent et désodorisent en quelques secondes les mains, ainsi que toutes les surfaces rigides et non poreuses. La lingette bactéricide est le premier nettoyant désinfectant pour les mains, la bureautique, la téléphonie. La solution imprégnée sur une lingette alvéolée, permet la pénétration du bio-film, la destruction des différents microbes, germes et bactéries puis leur élimination. La lingette bactéricide contient de l'Aloé Vera, elle est enrichie en vitamine E, elle évite ainsi le dessèchement de la peau lors d'utilisations prolongées ou fréquentes.

Conforme à la norme EN 1276
EN 1275 VIRUCIDE EN14476
Grippe A H1N1

3. Mode d'emploi

Enlever l'opercule métallique de conservation située sur le couvercle et tirer la lingette.
L'introduire dans l'ouverture centrale du couvercle distributeur.
Tirer la lingette qui se découpera selon les pointillés de pré découpe.
Frotter énergiquement les supports à décontaminer ou les mains.
Jeter la lingette souillée.
Il est recommandé de bien fermer le distributeur après emploi.

4. Caractéristiques

5889BACNF1/GM : Pots de 130 Lingettes (Format 22.5 x 18 cm)
5889BACNF1/PM : Pots de 70 Lingettes (Format 15.2 x 20.3 cm)

Support : Cellulose

5. Stockage et étiquetage

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides sont considérés comme produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.